

مرکز درمانی و آموزشی امیرالمؤمنین (ع) اراک
دفتر بهبود کیفیت

عنوان دستگاه : گلوکومتر

نحوه عملکرد دستگاه:



دستگاه گلوکومتر

دستگاه با دکمه قرمز روشن می شود.

ابتدا دستگاه code check می شود.

کد نوار گلوکومتر روی صفحه ظاهر می شود.

پس از چک دستگاه آماده است .

نوار گلوکومتر از سمت خط های مشکی در جایگاه خود قرار می گیرد.

خون بیمار از سمت شیشه ای روی نوار گلوکومتر قرار می گیرد.

بعد از چند ثانیه عدد مربوط به B.S بیمار روی صفحه نمایش داده می شود.

با کشیدن نوار گلوکومتر، دستگاه خاموش می شود.