


مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (ع) اراک

دفتر بهبود کیفیت

عنوان دستگاه : ساکشن سانترال

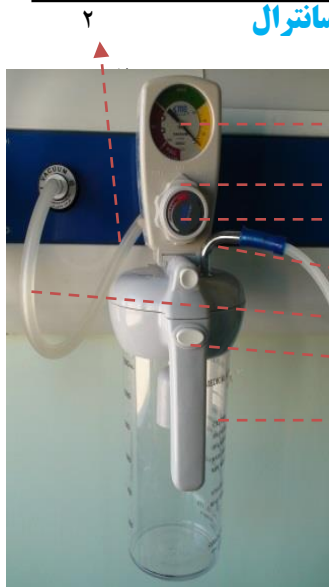

قسمتهای تشکیل دهنده دستگاه :

- ۱-رابط ساکشن به مخزن
- ۲-فیلتر
- ۳-درجه ساکشن
- ۴-کلید شماره ۱ (کرم رنگ)
- ۵-کلید شماره ۲ (روتاری گرد بابرچسب آبی-قرمز)
- ۶-کلید شماره ۳
- ۷-رابط ساکشن به نلاتون
- ۸-باتل مدرج

روش استفاده :

ابتدا رابط ساکشن (لوله ساکشن) را به باتل ساکشن وصل می کنیم، رابط ساکشن باید روزانه تعویض شود. فیلتر ساکشن تاریخ وصل داشته باشد ، فیلتر ساکشن در صورت عدم تغییر رنگ هر دو هفته یک بار در صورت ایجاد تغییر رنگ بلافاصله تعویض شود.

جهت ایجاد فشار منفی کلید شماره ۱ دستگاه را روی FULL فیکس کرده جهت افزایش و کاهش فشار ساکشن کلید شماره ۲ را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم.

دست ها را به روش صحیح شسته ، دستکش پوشیده و عملیات ساکشن را شروع می کنیم. نلاتون وصل شده به لوله ساکشن حتماً استریل باشد و با جایی تماس نداشته باشد. جهت ساکشن سوند نلاتون را کلمپ کرده و وارد تراشه بیمار می شویم و سپس به صورت چرخشی نلاتون را خارج می کنیم. طول مدت ساکشن نباید از ۱۰ ثانیه بیشتر شود، پس از دریافت اکسیژن ، در صورت نیاز مجدداً بیمار ساکشن می شود. در صورتی که ترشحات بیمار غلیظ و چسبنده باشد می توان از آب مقطر جهت رقیق کردن ترشحات استفاده کرد. میزان سرم رقیق شده داخل لوله تراشه نباید از ۲cc در هر نوبت بیشتر باشد. پس از تعویض نلاتون داخل دهان بیمار را ساکشن می کنیم.

باتل ساکشن مدرج ۱۲۰۰cc گنجایش دارد جهت جداکردن باتل دکمه شماره ۳ باتل رافشار می دهیم ، باتل جداشده را با آب و مواد شوینده شسته و با محلول ضد عفونی به مدت ۱۵ دقیقه ضد عفونی می نماییم.