


مرکز درمانی و آموزشی امیرالمؤمنین (ع) اراک

دفتر بهبود کیفیت

عنوان دستگاه : پالس اکسیمتر Handoxy

روش استفاده :


۱- اتصال به برق جهت شارژ دستگاه.

۲- دکمه  را چهار ثانیه نگه داشته تا صدای بوق شنیده و دستگاه روشن شود.

۳- کابل Spo₂ را به کانکتور بالای دستگاه متصل نمایید.


۴- پروب را به انگشت بیمار متصل نمایید.


۵- بعد از ۱۰ ثانیه میزان Spo₂ و پالس روی صفحه نمایش مشاهده می شود.


۶- روشن شدن نور پس زمینه با کلید  |


۷- جابجایی از منو و افزایش یا کاهش مقادیر با کلید

های  

۸- ورود به منوی تنظیمات. 

۹- مشاهده مقادیر Perfusion و دمای بدن و بررسی تنظیمات دستگاه. 

۱۰- قطع موقت هشدارهای صوتی. 

۱۱- برای خاموش کردن دکمه  را ۴ ثانیه نگه داشته تا صدای بوق شنیده شود.

