

مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین(ع) اراک

دفتر بهبود کیفیت

عنوان دستگاه : ساکشن پرتابل



روش استفاده :

قسمت های تشکیل دهنده دستگاه:

- ۱- بدنه
- ۲- دو عدد باتل مخصوص ساکشن
- ۳- فیلتر و رابط فشار
- ۴- پدال پایی
- ۵- دکمه های خاموش روشن یکی روی دستگاه و دیگری در کنار بدنه
- ۶- تنظیم فشار منفی
- ۷- سیم رابط

نحوه کار با دستگاه:

ابتدا دستگاه ساکشن را توسط سیم رابط که در پشت دستگاه قرار گرفته است را به برق ۲۲۰ ولت متصل کرده و دکمه کنار دستگاه را جهت روشن فشار دهید. سپس کلید روی بدنه را روشن کرده و در صورتی که برق در دستگاه جریان داشته باشد کلید با چراغ زرد روشن می شود. جهت ایجاد فشار منفی اگر کلید مدرج روی دستگاه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید می توانید فشار منفی دلخواهتان را ایجاد کنید. رابطی بین دو باتل (دو ظرف شیشه ای مخصوص ترشحات) قرار گرفته است که قابل جدا شدن است. جهت استفاده از هر کدام از باتل ها شما باید قسمت جدا شونده رابط را به سر باتل مورد نظرتان متصل کنید تا نیروی خلاء جهت مکش ترشحات به باتل مورد نظرتان منتقل شود و اکنون می توانید یک سر لوله رابط ساکشن را به سر باتل مورد نظر وصل کرده و نلاتون با سایز دلخواه را به سر دیگر لوله رابط فیکس کرده و شروع به ساکشن نمایید.

نکته: هنگامی که عمل ساکشن را به تنهایی انجام می دهید جهت رعایت نکات

استریل به راحتی می توانید از پدال پایی دستگاه استفاده نمایید.