


## عنوان دستگاه : Bene View TA

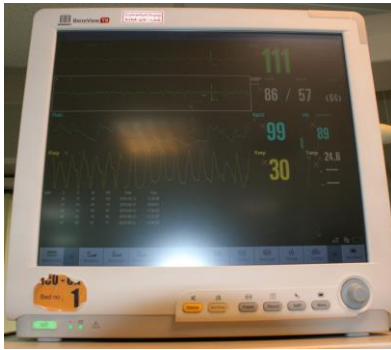

### پانل جلوی دستگاه

۱.  ON/OFF: روشن و خاموش کردن دستگاه
۲.  در صورت وصل بودن به برق شهر این چراغ روشن می شود (رنگ سبز)
۳.  در صورت وجود باتری و شارژ بودن این چراغ روشن می شود. (رنگ سبز)  
در صورتی که آلام Low Battery داشته باشد این چراغ قرمز شده و در صورتی که برای شارژ باتری صورت نگیرد پس از ۵ دقیقه دستگاه خاموش می شود.
۴.  غیرفعال کردن هشدار صوتی به مدت ۲ دقیقه
۵.  جهت مشخص نمودن سطح آلام های دستگاه
۶.  با فشردن این دکمه حرکت صفحه نمایش جت مشاهده دقیق متوقف شده ، با فشردن مجدد این دکمه روند عادی انجام می شود.
۷.  صدور فرمان ضبط سیگنال به صورت دستی
۸.  با هر بار فشردن در صورت مناسب بودن شرایط کا ف باد شده و به صورت اتوماتیک و به آرا می تخلیه شده و فشارهای سیستولیک و دیاستولیک اندازه گیری شده و بر روی صفحه نمایش درج می گردد.
۹.  با فشردن این دکمه منوی اصلی تغییرات دستگاه فعال شده و با فشار مجدد این دکمه این منو غیر فعال می شود.
۱۰.  جهت تغییر setting دستگاه

### صفحه نمایش

۱. **ECG Lead**: منحنی الکترو کاردیوگرام و تعداد ضربان قلب را نمایش می دهد. با لمس کردن این لاین می توان نوع لید و اندازه منحنی ها را تغییر داد.
۲. **Resp Lead**: منحنی تنفس و تعداد تنفس را نمایش می دهد.
۳. **N/BP**: فشار خون سیستول و دیاستول را نمایش می دهد.
۴. **Sat**: درصد O<sub>2</sub> SAT را نمایش می دهد.
۵. **Art.I**: منحنی و میزان IBP (فشار خون شریانی) را نشان می دهد.
۶. **CVL**: منحنی فشار ورید مرکزی و اندازه آن را نشان می دهد.
۷. **درجه حرارت**: در صورت فعال بودن درجه حرارت بدن را نمایش می دهد.
۸. **Measurment**: جهت تغییر، حذف یا اضافه نمودن منحنی های روی صفحه از این آیتم استفاده می شود (آیتم های ART – CVP T – NIBP – SPO<sub>2</sub> – ECG)