



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲
تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰
تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۲۵
تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰
ویرایش: 01
کد دستورالعمل: 501N66

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) بهبود کیفیت و اعتبار بخشی دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی ابزار و وسایل
مخاطبین: کلیه کارکنان واحد استریلیزاسیون

هدف: حذف و کاهش میزان میکروارگانیزم های موجود بر روی وسایل قبل از استریلیزاسیون و حصول اطمینان از ضد عفونی موثر وسایل

این دستورالعمل بایستی توسط پرسنل CSR تحت نظر مسئول واحد به صورت زیر رعایت گردد:

روش اول شستشوی دستی:

۱. پرسنل CSR در کوتاهترین فاصله زمانی از تحویل گرفتن وسایل، شستشوی اولیه وسایل را به منظور پاک نمودن و زدودن خون، مایعات و بافت ها از وسایل انجام دهند.
۲. پرسنل CSR وسایل را با دقت برس کشی نمایند.
۳. پرسنل CSR ابزارها را پس از آبکشی و خشک شدن جهت ضد عفونی در محلول گندزدا به مدت معین برای هر محلول قرار دهند.
- * غلظت و زمان قرار دادن وسایل در محلول بستگی به نوع محلول و دستورالعمل شرکت سازنده محلول دارد.
۴. پرسنل CSR آبکشی نهایی وسایل را انجام داده و پس از خشک شدن، کارکرد صحیح ابزارها را بررسی و کنترل نمایند.
۵. پرسنل CSR ابزارها را طبق چک لیست هر پک، جهت استریلیزاسیون پک نمایند.
- * پرسنل CSR در تمام مراحل فوق از گان، ماسک، کلاه، عینک و دستکش استفاده کنند.

روش دوم شستشوی دستی:

۱. پرسنل CSR در کوتاهترین فاصله زمانی از تحویل گرفتن وسایل، شستشوی اولیه وسایل را به منظور پاک نمودن و زدودن خون، مایعات و بافت ها از وسایل انجام دهند.
۲. پرسنل CSR وسایل را با دقت برس کشی و سپس خشک نمایند.
۳. پرسنل CSR ابزارها را باز نموده و در دستگاه اولترا سوند جهت ضد عفونی قرار دهند.
۴. پرسنل CSR ابزارها را بعد از گذشت زمان تنظیم شده برای دستگاه خارج نمایند.
۵. پرسنل CSR آبکشی نهایی وسایل را انجام داده و پس از خشک شدن، کارکرد صحیح ابزارها را بررسی و کنترل نمایند.
۶. پرسنل CSR ابزارها را طبق چک لیست هر پک، جهت استریلیزاسیون پک نمایند.
- * پرسنل CSR در تمام مراحل فوق از گان، ماسک، کلاه، عینک و دستکش استفاده کنند.
- * در دستگاه اولترا سوند از محلول ضد عفونی کننده مورد تأیید واحد بهداشت محیط بیمارستان استفاده شده، غلظت محلول طبق دستورالعمل شرکت سازنده دستگاه اولترا سوند و شرکت سازنده محلول تعیین و با نظارت سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان تهیه شده و مورد استفاده قرار گیرد.
- * زمان و دمای دستگاه اولترا سوند طبق دستورالعمل این مرکز ۱۰ دقیقه و ۳۵۰ درجه سانتیگراد تنظیم شود و پس از خارج کردن ابزار از دستگاه دو نوع تست پروتئین و خون از وسایل انجام شود (با منفی بودن جواب تست محلول مجدداً قابل استفاده می باشد).

شستشوی اتوماتیک:

۱. پرسنل CSR در کوتاهترین فاصله زمانی از تحویل گرفتن وسایل، شستشوی اولیه وسایل را به منظور پاک نمودن و زدودن خون، مایعات و بافت ها از وسایل انجام دهند.
۲. پرسنل CSR ابزارها را از ناحیه لولا باز کرده و در توری های مخصوص دستگاه ست شور قرار دهند. همچنین گالی پات ها و رسیورها را به صورت وارونه در دستگاه قرار داده و پس از چینش صحیح وسایل درب دستگاه را ببندند.
۳. پرسنل CSR از صحت دستگاه و مناسب بودن فشار و دمای آب اطمینان حاصل کرده و بهترین و مناسب ترین برنامه دستگاه را انتخاب نمایند.
۴. پرسنل CSR بعد از گذشت ۴۵ دقیقه و اتمام مراحل شستشو، ضد عفونی و خشک شدن، درب دستگاه را به آرامی باز کرده و ابزارها را خارج نمایند.



تاریخ اولین ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۲
 تاریخ آخرین بازنگری: ۹۷/۴/۳۰
 تاریخ آخرین ابلاغ: ۹۷/۵/۲۵
 تاریخ بازنگری بعدی: ۹۸/۴/۳۰
 ویرایش: 01
 کد دستورالعمل: 50IN66

مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) بهبود کیفیت و اعتبار بخشی دستورالعمل داخلی

عنوان دستورالعمل: شستشوی دستی یا اتوماتیک و پاک سازی ابزار و وسایل

مخاطبین: کلیه کارکنان واحد استریلیزاسیون

هدف: حذف و کاهش میزان میکروارگانیزم های موجود بر روی وسایل قبل از استریلیزاسیون و حصول اطمینان از ضد عفونی موثر وسایل

۵. پرسنل CSR کارکرد صحیح ابزارها را بررسی و کنترل نموده و آن ها را طبق چک لیست هر پک، جهت استریلیزاسیون پک نمایند.
 * پرسنل CSR در تمام مراحل فوق از گان، ماسک، کلاه، عینک و دستکش استفاده کنند.

امکانات و تسهیلات مورد نیاز:

برس های شستشو، محلول های گندزدا، وسایل حفاظت فردی، دستگاه اولترا سوند، دستگاه ست شور

منابع:

کتاب راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی، تجربه بیمارستان

تهیه کننده / تهیه کنندگان		
زهره ابراهیم آبادی (پرسنل اتاق عمل)	اکرم سادات موسوی نیا (پرسنل CSR)	رفیعه کاوند (پرسنل CSR)
الهام تقوایی (مسئول واحد بهداشت محیط)	محمد تقی جودکی (سوپروایزر کنترل عفونت)	اسفندیار تهوری (مسئول اتاق عمل و CSR)
ابلاغ کننده	تصویب کننده	تأیید کننده
دکتر سید محمد جمالیان (ریاست بیمارستان)	اعضای کمیته کنترل عفونت بیمارستان	محمد تقی جودکی (سوپروایزر کنترل عفونت)