

کد دستورالعمل: INS-LAB-7	بسمه تعالی	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
تاریخ ابلاغ 96/07/01	بیمارستان والفجر تفرش	
تاریخ بازبینی: 97/07/01	واحد بهبود کیفیت	
عنوان دستورالعمل: نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه سروایمونولوژی و هورمون انجام می شود.		

هدف:

-انجام دقیق آزمایشات بر اساس پروسیجر مشخص و تأیید شده

-بالا بردن سطح دقت و عملکرد آزمایشات

دامنه کاربرد:

آزمایشگاه

تعاریف:

نحوه ی انجام آزمایشات بخش هورمون و سروولوژی که به شرح ذیل می باشد.

مهارت مسئول:

مسئول فنی آزمایشگاه

مسئول بخش سروایمونولوژی و هورمون

شرح اقدامات:

دستورالعمل آزمایشات بخش سروولوژی:

1. نمونه های سرم سانتریفیوژ و آماده کنید.
 2. لیست کاری مربوطه را تهیه کنید.
 3. به مستندات و بروشور کیت های مورد نظر مراجعه کنید.
 4. آزمایش را انجام دهید و همچنین کیت را با ویالهای کنترل مثبت و منفی موجود در کیت کنترل کنید.
 5. جوابها را در لیست کاری ثبت و از صحت موارد ثبت شده اطمینان حاصل کنید.
 6. لیست کاری را به مسئول پذیرش ارائه دهید و در نهایت در کامپیوتر ثبت کنید.
- دستورالعمل آزمایشات هورمون شناسی:
1. سرمهای فریز شده را خارج کرده بگذارید ذوب شود.
 2. کیت های مصرفی را نیم ساعت قبل از شروع آزمایش از یخچال جهت رسیدن به دمای محیط خارج کنید.
 3. لیست کاری را تهیه کنید

4. آزمایش را طبق بروشور کیت انجام بدهید.

5. تست ها را با دستگاه الیزا ریدر بخوانید و مستند سازی پرینت جوابها ی خوانده شده توسط دستگاه را انجام بدهید.

6. جوابها را در لیست کاری ثبت کنید.

7. جوابها را به بخش پذیرش ارائه دهید و در کامپیوتر ثبت نمائید.

مستندات و سوابق:

پرینت نتایج دستگاه

لیست های کاری سرولوژی

منابع:

کیت های مصرفی در بخش هورمون و سرولوژی

الیزا ریدر

روتاتور سرولوژی

تصویب کننده: دکتر کوروش دالوندی-ریاست بیمارستان 	تایید کننده: علی سلگی-مدیریت بیمارستان 	تهیه کنندگان: خدیجه ظهیری-مسئول آزمایشگاه  فاطمه محمودیان -کارشناس آزمایشگاه 
---	--	---