


کد دستورالعمل: ۲-INS-CSR	بسمه تعالی بیمارستان والفجر تفرش واحد بهبود کیفیت	
تاریخ ابلاغ: 1396/08/01		
تاریخ بازبینی: 1397/08/01	عنوان دستورالعمل: گندزدایی ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد	

هدف:

ایمنی بیمار

حصول اطمینان از ضد عفونی موثر و ارسال ایمن و مطلوب ابزار و وسایل قبل از استریلیزاسیون
حذف و کاهش میزان میکروارگانیسم های موجود بر روی وسایل قبل از استریلیزاسیون

دامنه کاربرد:

کاربران CSSD و کمک بهیاران و پرسنل اتاق عمل

تعاریف:

گندزدایی: حذف تعداد زیاد یا همه میکروارگانیسم های پاتوژنی که بر روی اشیاء بی جان وجود دارند بجز اسپور باکتری ها

مهارت مسئول:

شرح اقدامات:

گندزدایی با دست ابزار اتاق عمل با قابلیت استفاده مجدد

رعایت نکات ذیل در هنگام گندزدایی با دست الزامی است.

از دستکش ضخیم عینک محافظ و روپوش و روپوش استفاده شود.

گندزدایی با دست: پس از شستشوی ابزار طبق دستورالعمل شستشوی ابزار کلیه ابزار و وسایل باید گندزدایی گردند.

ابزار شسته شده در محلول آب و دزومدان ای دی 3 درصد که در اطراف مخصوص آماده می شود قرار دهید.

(طبق دستورالعمل)

پس از اتمام زمان ۱۵ دقیقه ابزار ابکشی و بلافاصله خشک گردد.

با ابزارهای استفاده نشده باید مثل ابزارهای استفاده شده رفتار نمایید.

گندزدایی با دستگاه:

گندزدایی ابزار با دستگاه ست شور به صورت اتوماتیک و با محلول گندزدایی انتی سپتیک بر اساس برنامه انتخاب شده کاربر دستگاه و با توجه به نوع وسیله انجام می شود.

دارای ۳ برنامه:

۱P: شامل ابزار های پلاستیکی و سلیکونی

۳P: شامل ستهای اتاق عمل و جنرال

۴P: برای ستیهای ظریف و میکروسرجری

ضمن رعایت احتیاطهای استاندارد (طبق دستورالعمل) موارد ذیل اجرا شود:

ابزار را با فاصله در بسکت قرار دهید.

نوک تیز و بلند ابزار به سمت داخل چیده شوند.

دستگاه را طبق دستورالعمل روشن و برنامه لازمه را استارند نمایید

پس از اتمام کار از درب استریل ابزار را خارج کنید.

محل دستگاه و اش با نام ننودیشر ان و سپتو می باشد که در محل مخصوص جاگذاری می شود.

کنترل نهایی ابزار لوله ای شکل: پس از پایان فرایند گندزدایی باید توسط دستگاه بخار و فشار ابزار لوله ای شکل و دارای خلل و فرج را مجدداً کنترل نموده تا هیچ جرمی داخل آنها باقی نمانده باشد.

در صورت اعلام خطا باید متن خطا روی نمایشگر دستگاه را قرائت و به واحد تجهیزات برای بررسی اعلام نمایید.

پس از برطرف شدن مشکل از اول سیکل اجرا شود:

۴ - ۲ گندزدایی ابزار در بخش ها

رعایت احتیاط های استاندارد در کلیه مراحل گندزدایی الزامی است) دستکش کان ماسک عینک - - (

ابزار پس از پایان مرحله شستشو و پاک شده به دقت آبکشی شده و خشک شوند.

ابزار در محلول های لول دزودمان ای دی 3 درصد که در ظرف مخصوص آماده شده و لیبل تاریخ و مشخصات

است غوطه ور شوند. ابزار پس از صرف زمان ۱۵ دقیقه از محلول خارج گردیده و آبکشی شوند.

ابزار را خشک نمایید و طبق چک لیست و در باکس مخصوص جهت بسته بندی و استریل به CSSD منتقل کنید.

مستندات و سوابق:

منابع:

کتاب راهنمای مراقبت عفونت های بیمارستانی دستورالعمل محلول ها و دستگاه ست شور

تهیه کننده:	تایید کننده:	تصویب کننده:
علی سلگی-کارشناس بهداشت محیط	علی سلگی-مدیریت بیمارستان	دکتر کوروش دالوندی-ریاست بیمارستان
